


Схема расположения электродов по методу EASI на регистраторах DigiTrak:

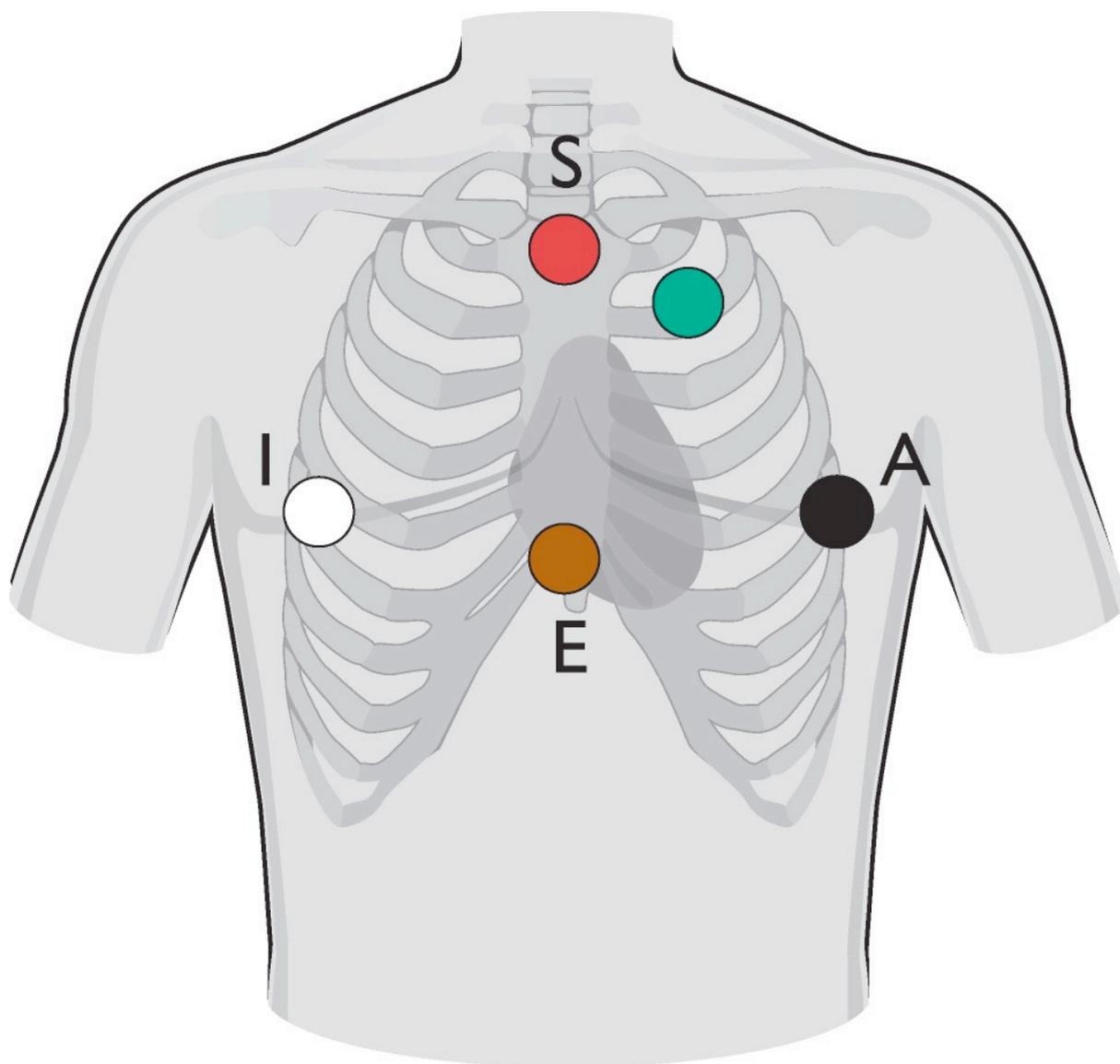

Расположение электродов:

E (Коричневый) - уровень 5-го межреберья, средняя часть грудины.

A (Черный) - тот же уровень, что и для **E** и **I**, левая среднеподмышечная линия.

S (Красный) - верхняя часть грудины (рукоятка грудины).

I (Белый) - тот же уровень, что и для **E** и **A**, правая среднеподмышечная линия.

Земля (Зеленый) – под серединой ключицы или любой другой удобный участок.

Описание Raw-канала:

Канал 1 - от **E** (+) к **S** (-), сходен с MC V1, передняя проекция сердца.

Канал 2 - от **A** (+) к **S** (-), сходен с MC V6, боковая проекция сердца; подходит для измерения сегмента ST.

Канал 3 - от **A** (+) к **I** (-), сходен с нижним отведением aVF; подходит для измерения сегмента ST.